



## ИНСТРУКЦИЯ Reneplast®

**Назначение и описание принципа действия медицинского изделия.** Лейкопластырь защищает небольшие повреждения кожи: царапины, ссадины, порезы от внешнего инфицирования и загрязнений. Абсорбирующая подушечка обеспечивает впитывание жидкости раневой поверхности (экссудата), а также создает благоприятные условия для естественного заживления поврежденного участка кожи. Благодаря клеевой основе лейкопластырь плотно прилегает к коже и надежно фиксируется на ее поверхности. Лейкопластырь предназначен для одноразового использования.

**Показания к применению.** Защита небольших повреждений кожи: ссадин, порезов, царапин и других нарушений целостности кожи.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав изделия (наличие предрасположенности к аллергии).

**Способ применения.** Очистите и просушите участок кожи в области повреждения. Желательно дополнительно обработать поврежденный участок кожи раствором антисептика. Не удаляйте поврежденную кожу! Перед использованием необходимо вскрыть упаковку по краю и извлечь полоску лейкопластыря. Удалите с поверхности лейкопластыря защитную бумагу и, не прикасаясь пальцами к подушечке, расположите ее на ране, а клеевую основу приклейте к сухой чистой коже. Избегайте соприкосновения клеевой основы с областью повреждения, при этом абсорбирующая подушечка должна полностью покрыть рану. При необходимости удалите лейкопластырь аккуратным движением по росту волос. Лейкопластырь рекомендуют менять не реже двух раз в сутки.



**RENEWAL**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ ОБНОВЛЕНИЕ

Тел./факс: 8 (800) 200-09-95

Применяйте лейкопластырь регулярно до полного восстановления поврежденной кожи. Лейкопластырь не является водонепроницаемым, поэтому при проведении гигиенических процедур требует дополнительной защиты от попадания влаги.

**Возможные побочные эффекты.** Аллергические реакции, контактный дерматит. В случае возникновения побочных эффектов следует немедленно прекратить использование лейкопластыря, обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.** Не используйте изделия одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи.

**Меры предосторожности.** 1. Лейкопластырь предназначен только для наружного применения. 2. Не использовать повторно. 3. Избегать контакта клеевой основы с поврежденной поверхностью. 4. Не применять лейкопластырь с нарушенным защитным покрытием. 5. При применении или удалении лейкопластыря не разрезать. 6. Если повреждение сохраняется и применение лейкопластыря приносит дискомфорт, следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу.

**Состав:** тканевая основа (60% - полиэстер, 40% - вискоза), клеевая масса (75% - белое масло, 15% - канифоль, 10% - каучук), абсорбирующая подушечка (90% - вискоза, 10% - дакрон), антиадгезионная силиконизированная бумага.

**Условия хранения.** Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C и относительной влажности не более 80%. Хранить в недоступном для детей месте.

**Порядок осуществления утилизации и уничтожения.** Утилизировать использованный лейкопластырь можно как отходы класса А совместно с бытовыми отходами.

**Производитель:** Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd., China/Чжэцзян Банли Медикал Продактс Ко., Лтд., Китай.

**Адрес производства:** No. 118 Yuegui South Road, City West New District, Youngkang City, Zhejiang Province, 321300, China/Юэгуэй Саус Роуд 118, Сити Уэст Нью Дистрикт, г. Юнкан, провинция Чжэцзян, 321300, Китай.

**Уполномоченный представитель в РФ/Импортер:** АО «ПФК Обновление».

**Юридический адрес:** Российская Федерация, 633621, Новосибирская обл., Сузунский р-н, р.п. Сузун, ул. Комиссара Зятыкова, д.18, тел./факс: 8 (800) 200-09-95.

**Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя:** АО «ПФК Обновление». Российская Федерация, 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80, e-mail: [pretenzii@pfk-obnovlenie.ru](mailto:pretenzii@pfk-obnovlenie.ru)